

YOTU E L

SPECIAL

35%
Hydrogen Peroxide

**С НОВЫМ ДВУСОСТАВНЫМ ШПРИЦОМ
И НОВЫМ ПРОТОКОЛОМ ПРОЦЕДУРЫ
КЛИНИЧЕСКОГО ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ**

YOTUEL

SPECIAL

35%
Hydrogen Peroxide

Для чего понадобилось изменить дизайн двусоставного шприца YOTUEL Special 35%?

Новый форм-фактор двусоставного шприца Йотуэль Спешал 35% и новая технология активации отбеливающего геля дают следующие преимущества:

- Более простое и быстрое нанесение отбеливающего геля на отбеливаемые зубы;
- Более ровное распределение отбеливающего состава по поверхности зуба без дополнительных манипуляций;
- Непрерывная активация отбеливающего состава без дополнительных действий со стороны стоматолога;
- Более эффективное высвобождение кислорода в процессе отбеливания зубов;
- В новой формуле повышено содержание ксилитола, фторида и калия;
- Состав более стабилен, что дает восхитительно однородный результат отбеливания зубов.

YOTUEL

SPECIAL

35%
Hydrogen Peroxide

Визуальные отличия старого и нового двусоставных шприцов Yotuel Special 35%:


- ❑ В старом двусоставном шприце, оба контейнера были одинакового размера; в новом шприце - один из контейнеров в 4 раза больше другого;
- ❑ В старом шприце оба контейнера содержали компоненты прозрачного геля; в новом шприце - один контейнер содержит жидкость белого цвета, а второй прозрачную жидкость
- ❑ И старый и новый шприцы на выходе (после смешивания компонентов отбеливающего состава в канюле шприца) дают однородный прозрачный гель, однако если протокол процедуры отбеливания зубов старым набором Yotuel Special требовал несколько дополнительных фаз реактивации отбеливающего геля при помощи отдельного пузырька активатора, то новый набор для клинического отбеливания зубов Yotuel Special поставляется без дополнительного активатора, т.к. основой новой технологии является постоянная активация единожды смешанного геля!

YOTUEL


SPECIAL

35%
Hydrogen Peroxide

Визуальные отличия старого и нового двусоставных шприцов Yotuel Special 35%:

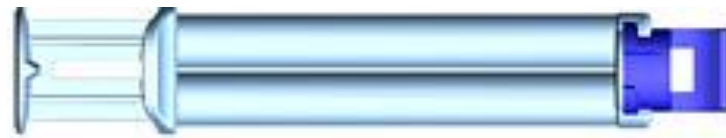

СТАРЫЙ: 2 контейнера одного размера

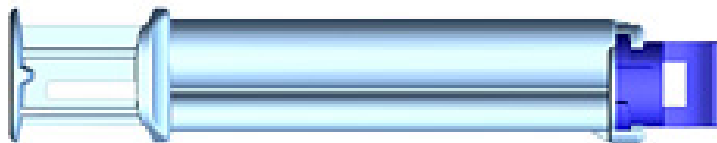

НОВЫЙ: один контейнер больше другого в 4 раза

YOTUEL

SPECIAL

35%
Hydrogen Peroxide

Визуальные отличия гелей в составе старого и нового двусоставных шприцов Yotuel Special 35%:



СТАРЫЙ: прозрачный гель в обоих контейнерах



НОВЫЙ: белый гель в одном контейнере
и прозрачный гель в другом

YOTUEL

SPECIAL

35%
Hydrogen Peroxide

Визуальные отличия получаемого при смешивании в канюле отбеливающего геля в старом и новом двусоставных шприцах Yotuel Special 35%:



СТАРЫЙ: на выходе получается прозрачный гель



НОВЫЙ: на выходе получается такой же
прозрачный гель

YOTUEL

SPECIAL

35%
Hydrogen Peroxide

Отличие комплектации старого и нового мини-наборов для клинического отбеливания зубов Yotuel Special 35%:



СТАРЫЙ: требуется реактивация дополнительным активатором входящим в комплект каждые 15 минут процедуры

НОВЫЙ: реактивация не требуется, отдельный пузырек не входит в набор, процедура делается в 2 нанесения по 20 минут

YOTUEL

SPECIAL

35%
Hydrogen Peroxide

Комплектация нового мини-наборов для клинического отбеливания зубов Yotuel Special 35%:



Мини-набор

- 2 двойных шприца
- 1 Гингивальный протектор
- 1 Зубная паста YOTUEL Classic
- 1 Шкала оттенков VITA
- 1 Инструкция по применению

Срок хранения: 18 месяцев
Хранить при температуре от 5 до 22° C